

# Комплект белья общехирургический

Разворачиваем комплект и раскладываем его на большом инструментальном столе




- 1 Простыня на большой инструментальный стол
- 2 Простыня с липким краем, для ног
- 3 Простыня с липким краем, на экран
- 4 Простыня ламинированная с липким краем - 2 шт.
- 5 Чехол для малого инструментального стола
- 6 Салфетки влаговпитывающие для осушения поверхностей - 4 шт.
- 7 Операционная фиксирующая лента - 3 шт.




1. Надеваем **чехол №5** на малый инструментальный стол



2. Раскладываем **нижнюю простыню №2**

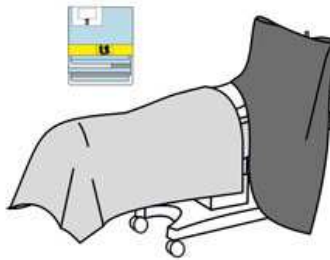

3. Раскладываем и фиксируем **верхнюю простыню №3** на экран

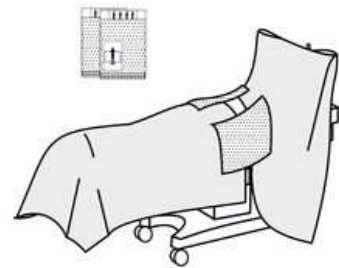

4. Фиксируем **ламинированные простыни №4** вдоль операционного поля